

Hygiene - Richtlinien für Ihre OSA Therapie Dreamstation CPAP/APAP Geräte

Die richtige Reinigung Ihres OSA Therapie-Geräts und Zubehörs sorgt für bessere Therapieergebnisse und verlängert die Lebensdauer Ihres Geräts, Ihrer Maske und des Zubehörs.

Allgemeine Hinweise:

- Ziehen Sie vor der Reinigung immer das Netzkabel aus der Steckdose
- Lassen Sie das Zubehör nach der Reinigung immer vollständig trocknen und verwenden Sie es erst dann wieder, damit kein Wasser in das Gerät eindringen kann (bitte nicht in der Sonne trocknen!)
- Reinigen Sie die Maske und den Atemschlauch mit der Hand (NICHT im Geschirrspüler!)
- Reinigungsmittel: Verwenden Sie ph- und duftneutrale Spülmittel oder eine milde Seife ohne Pflegestoffe, keine scharfen Haushaltsreiniger, keine Desinfektionsmittel, keine Reinigungsmittel mit Alkohol

TÄGLICH:

Reinigen Sie die **Maske** mit lauwarmem Wasser (und etwas Reinigungsmittel wie oben beschrieben). Nehmen Sie dafür die Maskenteile auseinander (lesen Sie dazu bitte die Bedienungsanleitung), spülen Sie sie danach gut aus und lassen Sie sie trocknen.

Bei Verwendung der **Befeuchterkammer**: leeren und reinigen Sie diese täglich per Hand mit etwas Reinigungsmittel, sowie 1x / Woche in einer Essigwasserlösung im Verhältnis 1:5. Füllen Sie sie vor Therapiebeginn immer frisch auf und verwenden Sie dafür abgekochtes Leitungswasser oder destilliertes Wasser, das für medizinische Zwecke geeignet ist

WÖCHENTLICH:

Atemschlauch reinigen (mit lauwarmem Seifenwasser), gut ausspülen und vollständig trocknen lassen

Kopfband reinigen (mit lauwarmem Seifenwasser), gut ausspülen und trocknen lassen (Klettverschlüsse vor dem Reinigen verschließen)

Gerät: Gehäuse und Netzteil mit feuchtem Tuch und etwas Reinigungsmittel (wie oben beschrieben) oder Desinfektionstuch abwischen, Display bitte nur trocken abwischen!

MONATLICH:

Spezialfilter (hellblau) falls vorhanden tauschen (kann nicht gereinigt werden!)

Pollenfilter (blauer Filter) überprüfen, mit lauwarmem Leitungswasser ausspülen, vollständig trocknen lassen

ALLE 6 MONATE:

Tauschen Sie den **Pollenfilter** (blauer Filter)

JÄHRLICH:

Tauschen Sie die **Maske** und den **Atemschlauch**

Sie haben jährlich Anspruch auf einen neuen Atemschlauch, eine neue Maske, sowie Filtersets nach Herstellerangaben!

Bestellen Sie diese bitte über:

e-Mail: medizin.at@vitalaire.at mit folgendem Betreff:

“OSA: Ihr Name, Kunden- oder Sozialversicherungsnummer”

Kontaktformular auf der Homepage: www.vitalaire.at

Service Hotline: 0810 / 242 144

Rechtlicher Hinweis: Bitte beachten Sie die detaillierten Herstellerangaben in den Bedienungsanleitungen Ihres Geräts und Ihrer Maske! Sollten die Informationen abweichend sein, führen Sie bitte die Reinigung nach den Herstellerangaben durch!

Ein Dokument Ihres individuellen Therapieplans, ein Service der
VitalAire Austria GmbH, ein Teil der Air Liquide Austria.

